

Порядок действий преподавателей во время работ бактерицидных установок в учебных аудиториях

1. РЕЦИРКУЛЯТОР РБ 2*15 (закрытого типа)

- 1.1. Рециркулятор **РБ 2*15** работает все время нахождения студентов в аудиториях включая перемены.
- 1.2. Преподаватели первой пары (1 и 2 смены), перед началом проведения пары – 9.00 ч и 11.40 ч включают рециркулятор **РБ 2*15** (закрытого типа), нажав клавишный переключатель на рециркуляторе.
- 1.3. Заполнить журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки (образец заполнения прилагается в журнале).
- 1.4. Преподаватели последней пары (1 и 2 смен), по окончании занятий выключают рециркулятор, нажав клавишный переключатель на рециркуляторе.
- 1.5. Заполнить журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки (образец заполнения прилагается в журнале).

2. ОБЛУЧАТЕЛЬ ОБН-150 (открытого типа)

- 2.1. Облучатели ОБН-150 (открытого типа) использовать при отстранении одного или нескольких студентов с признаками инфекционных заболеваний во время проведения учебного процесса;
- 2.2. вывести студентов из учебного кабинета;
- 2.3. выключить рециркулятор **РБ 2*15**;
- 2.4. включить облучатель в розетку на 10-15 мин (во время перемены);
- 2.5. выключить облучатель после его работы из розетки;
- 2.6. заполнить журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки (образец заполнения прилагается в журнале);
- 2.7. запустить студентов в учебные кабинеты.